
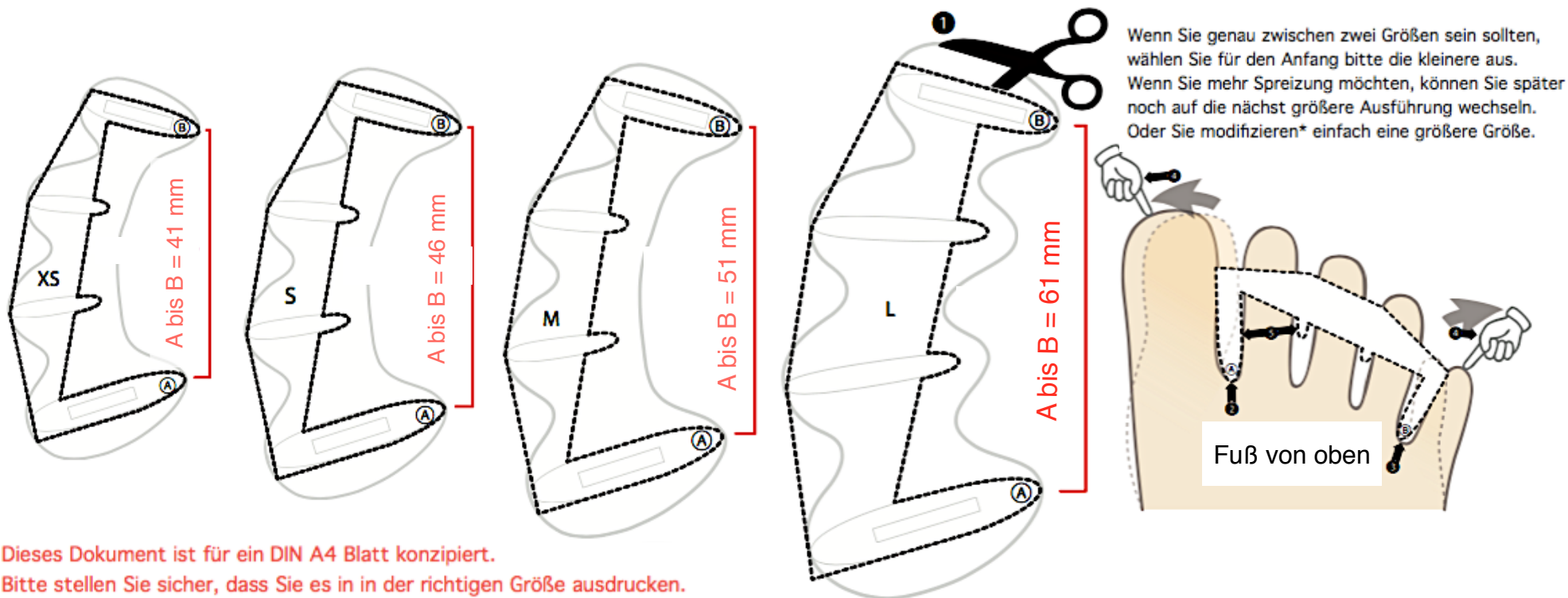


CorrectToes passen zu den meisten Fußformen und können darüber hinaus auch noch modifiziert\* werden. Bestimmen Sie Ihre Größe (Bitte im Stehen) folgendermaßen:

1. Schneiden Sie die Schablone(n) entlang der gepunkteten Linie aus.
2. Positionieren Sie „A“ wie abgebildet zwischen Ihrem großen und zweiten Zeh Ihres **rechten** Fußes.
3. Halten Sie „A“ fest und überprüfen Sie anhand der nebenstehenden Grafik wo sich „B“ befindet.

Die Punkte 1 bis 3 sind meist ausreichend die richtige Größe zu bestimmen.  
Falls Sie noch Zweifel haben, führen Sie noch die Punkte 4 und 5 aus.

4. Spreizen Sie mit der angelegten Schablone den großen und den kleinen Zeh nach außen und überprüfen Sie, wie sich das anfühlt. Sollte das sehr unangenehm sein, nehmen Sie lieber die kleinere Größe oder erwägen Sie eine Modifikation\*.
5. Überprüfen Sie den Umfang und die Breite Ihrer Zehen. Passen Ihre drei mittleren Zehen wie abgebildet zwischen „A“ und „B“? Die CorrectToes sollen Ihre Zehen nicht einengen!  
Wenn Sie Ihren linken Fuß auch überprüfen wollen, drehen Sie die Schablone einfach um.

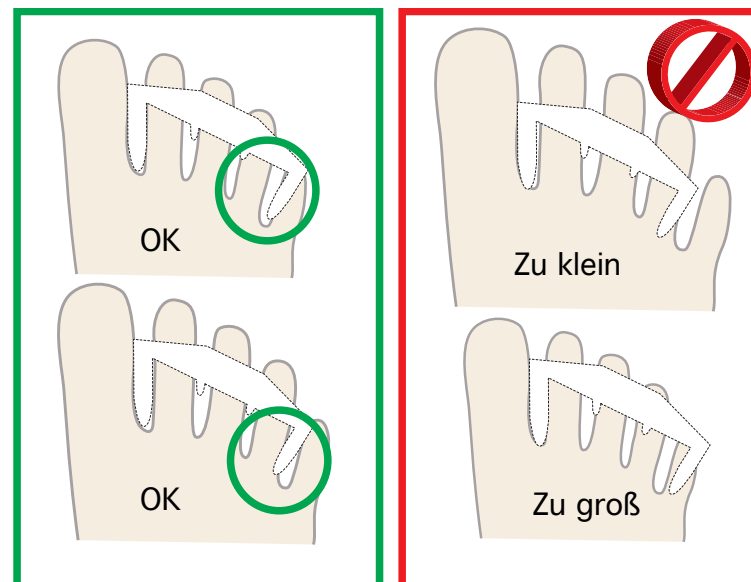

Wenn Sie genau zwischen zwei Größen sein sollten, wählen Sie für den Anfang bitte die kleinere aus.  
Wenn Sie mehr Spreizung möchten, können Sie später noch auf die nächst größere Ausführung wechseln.  
Oder Sie modifizieren\* einfach eine größere Größe.

Dieses Dokument ist für ein DIN A4 Blatt konzipiert.  
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie es in der richtigen Größe ausdrucken.  
Deaktivieren Sie die Funktion „An das Papierformat anpassen“.  
Die Maßangaben „A bis B“ müssen auf Ihrem Blatt übereinstimmen!